

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МАСКИ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ИЗ МАРЛИ

Маска гигиеническая из марли - средство индивидуальной защиты органов дыхания от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем, пыли. Выполнена в виде четырехслойной хлопковой марлевой маски с завязками из эластичной тесьмы.

Для наиболее эффективной защиты органов дыхания следует закрывать маской из марли нижнюю часть носа, носогубной треугольник и подбородок.

Рекомендуемая длительность **ношения маски из марли 2 часа**. Максимальная суммарная длительность ношения не должна превышать 4 часов. Смена маски должна производиться немедленно, в случае ее загрязнения, увлажнения.

Использовать строго индивидуально!

Маска из марли может быть использована повторно после мытья и обеззараживания. Мытье производить с применением хозяйственного мыла или синтетических моющих средств ручным способом или в стиральных машинах. После стирки обязательно следует обеспечить многократное их прополаскивание для удаления остатков моющих средств. В бытовых условиях обеззараживание масок из марли производится путем проглаживания утюгом при температуре глажения хлопковых тканей. Допускаются иные способы обеззараживания масок из марли методом, средствами и по режимам, допущенным Министерством здравоохранения Республики Беларусь в установленном порядке.

Хранить в чистом и сухом помещении при комнатной температуре. Срок хранения 5 лет.